



Wenn die Masken zu groß sind kann man die Ohrschlaufen sehr gut mit kleinen Silikonschlauchstücken verkürzen. Wir haben die Schläuche in zwei Größen vorrätig. Der kleinere Schlauch hat den Vorteil, dass er sehr fest sitzt und den Nachteil, dass er sehr schwer aufzuziehen ist. Der größere Schlauch geht leichter aufzuziehen, dafür sitzt er nicht so fest und verrutscht eher. Wir haben Ihnen beide Ausführungen zugesendet. Bitte senden Sie uns unverbrauchte Schlauchstücke wieder über die Hauspost zurück.

Die Montage erfolgt am einfachsten mit einem Metallbügel, es geht auch mit einem stabilen Bindfaden. Man schiebt das Schlauchstück soweit über den Drahtbügel bis man die Ohrschlaufen im Draht einhängen kann und zieht dann die Ohrschlaufe in den Schlauch.

Der Bindfaden wird durch das Schlauchstück geschoben, danach durch die Ohrschlaufe, wieder durch das Schlauchstück schieben und dann die Ohrschlaufe mit dem Faden in den Schlauch ziehen.