



Einfügen eines Bügels für eine bessere Nasenpassform (für die waschbare MNS-Variante der Universität)




An einer Seite befindet sich eine Öffnung (A). Greifen Sie die Innenseite durch die Öffnung.

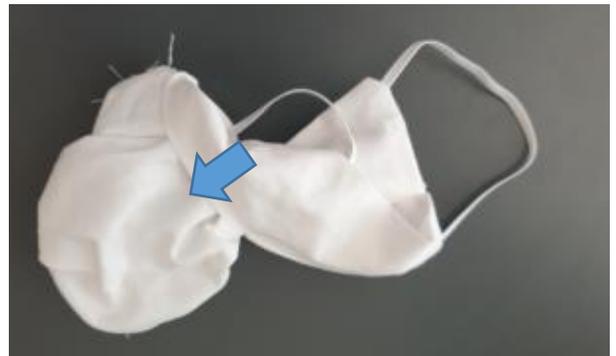


Stülpen Sie die Innenseite durch die Öffnung vollständig nach außen.

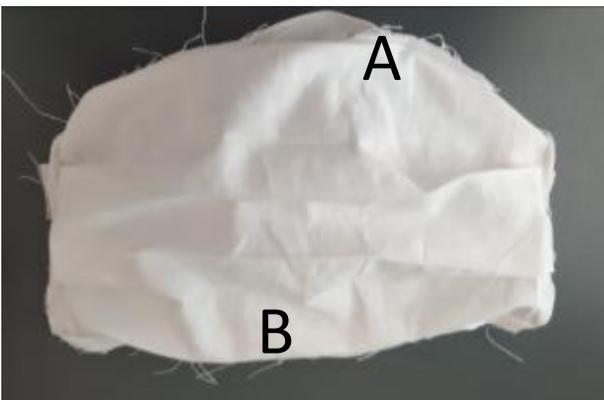


Die umgestülpte Maske hat gegenüber der großen Öffnung (A) eine kleine Tasche (B).

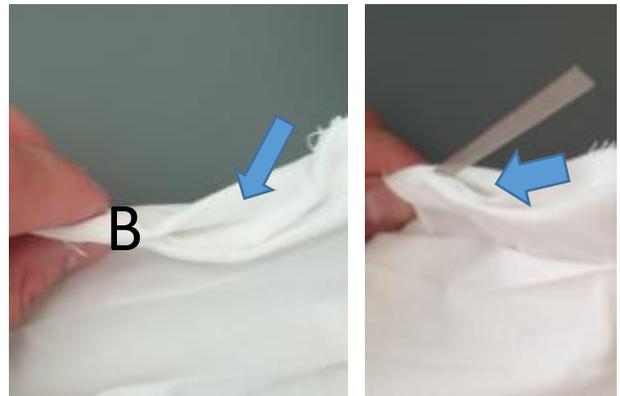

Schieben Sie den Metallstreifen in die kleine Tasche (B) vorsichtig hinein.

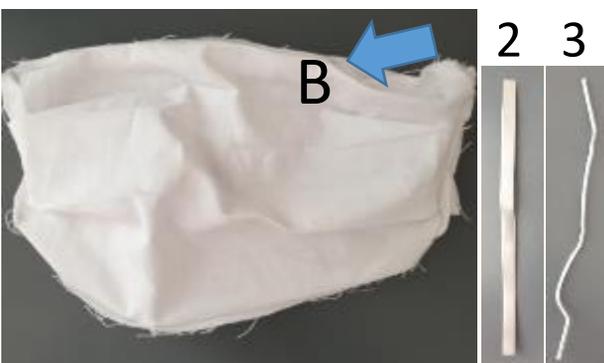

Schieben Sie den Streifen vollständig hinein. (2) Edelstahlstreifen werden bei der Maskenbestellung erhältlich sein. (3) Bei Verwendung anderer Streifen / Drähte: Vermeiden Sie scharfkantige Gegenstände! Eisen/Aluminium kann beim Waschen zu Verfärbungen führen - ggf. vor dem Waschen entfernen.

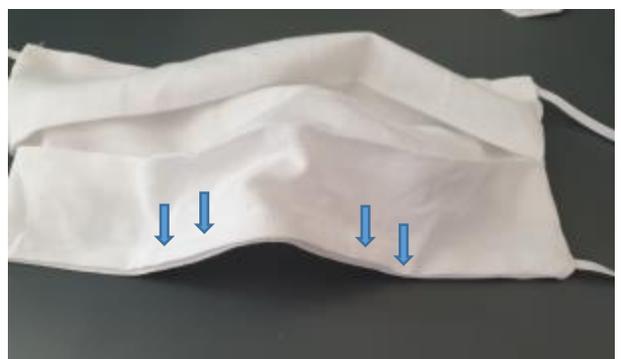

Stülpen Sie die Masken samt Streifen durch die große Öffnung wieder zurück. Ziehen Sie die Maske so an, dass der Streifen über der Nase liegt (ca. Höhe Wangenknochen) und drücken Sie den Streifen seitlich der Nase zum Anpassen an das Gesicht an.